

# DiaMondiaL

## Eine neue Generation in der Streptokokkendiagnostik



Die Bestimmung der Streptokokken der Lancefield Gruppe, wird bereits seit vielen Jahren mit der Latexmethode durchgeführt. DiaMondiaL ist es gelungen, durch seine **modifizierte Säureextraktion**, einen Test zu konzipieren, der alle **human relevanten Gruppen erfasst (auch D!)** und gleichzeitig **keine Inkubationszeit** erfordert.

### Entscheidende Vorteile des DiaMondiaL STREP KITs

- ▼ **modifizierte Säureextraktion**, erfasst alle human relevanten Gruppen (A - G) - inklusive D
- ▼ keine Inkubation - Durchführung bei Raumtemperatur
- ▼ keine Kreuzreaktionen mit anderen Gruppen ( z.B. Gruppe A mit Gruppe C, D mit G)
- ▼ hohe Sensitivität 98,6 %
- ▼ hohe Spezifität 100 %
- ▼ blaues Latex - verbesserte Ablesung: CMMP- Latexpartikel
- ▼ 1 Kolonie ausreichend für den Einsatz in der Testdurchführung
- ▼ Haltbarkeit der Tests 12 Monate
- ▼ alle Reagenzien auch einzeln verfügbar, 60 Bestimmungen

Leistungsdaten im Vergleich

	DiaMondiaL	Hersteller 1	Hersteller 2	Hersteller 3	Hersteller 4
Sensitivität	98,6 %	97,9 %	92,4 %	70,3 %	80,3 %




**Hersteller der DiaMondiaL Tests:**  
DiaMondiaL EEIG  
Divischgasse 4  
1210 Vienna, Austria



# DiaMondiaL STREP KITS

## Kurzanleitung

Alle Bestandteile des Kits sollten vor Testbeginn auf Raumtemperatur (22-28°C) gebracht werden

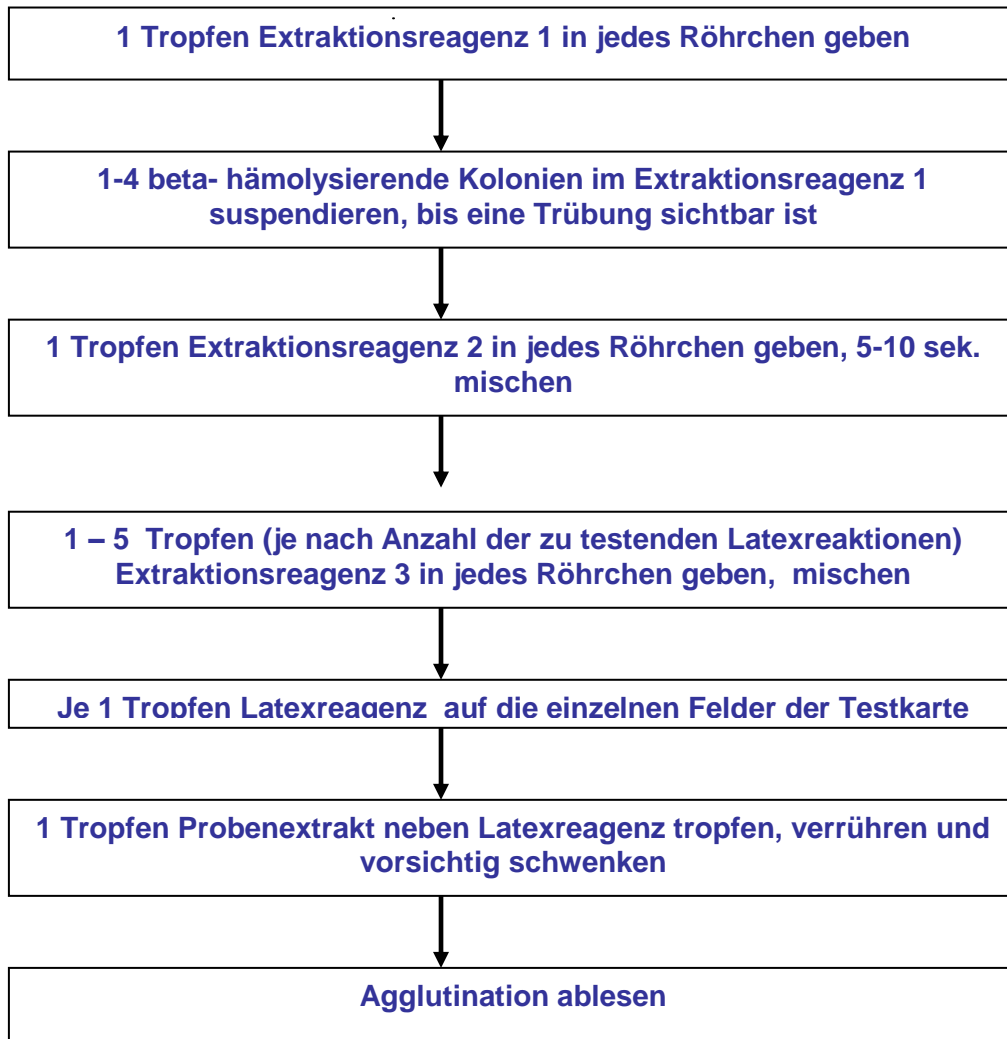

### Unsere DiaMondiaL Produkte im Überblick...

Produkt	Artikelnummer	Menge
DiaMondiaL Streptokokken Kit	HW/DML 1001	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Strep. Latex Group A (3 ml)	HW/DML 1002	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Strep. Latex Group B(3 ml)	HW/DML 1003	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Strep. Latex Group C(3 ml)	HW/DML 1004	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Strep. Latex Group D(3 ml)	HW/DML 1005	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Strep. Latex Group F(3 ml)	HW/DML 1006	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Strep. Latex Group G(3 ml)	HW/DML 1007	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Strep. Extraction 1 (3.2 ml)	HW/DML 1008	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Strep. Extraction 2(3.2 ml)	HW/DML 1009	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Strep. Extraction 3(3.2 ml)	HW/DML 1010	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Strep. Control (2 ml)	HW/DML 1011	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Mixing Sticks (300)	HW/DML 1012	60 Bestimmungen
DiaMondiaL Streptococcal Extraction Kit	HW/DML 1014	160 Bestimmungen

F\_DMLStrep\_20170912\_06



VIROTECH Diagnostics GmbH Löwenplatz 5 D-65428 Rüsselsheim

+49 (0)6142 69090 +49 (0)6142 690919

info@virotechdiagnostics.com www.virotechdiagnostics.com

